

## Емкость аспирационная Flovac Liner

ИМ-7.117318

вакуум 95 кПа, объем 1 / 1.5 / 2 / 3 л,  
антибактериальный фильтр

Flow Meter, Италия



### Характеристики

---

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Вакуум                   | 95 кПа            |
| Объем контейнера         | 1 / 1.5 / 2 / 3 л |
| Антибактериальный фильтр | Да                |

### Описание

---

**Flovac Liner** – аспирационные ёмкости, используются для сбора органических жидкостей при аспирации. Мягкая и прочная одноразовая емкость из полиэтилена низкой плотности (ПЭНП), испытанная на устойчивость к падениям и сложным условиям эксплуатации вставляется в многоразовую опорную емкость.

#### Объем:

- 1.0 л
- 1.5 л
- 2.0 л
- 3.0 л


Аспирационные контейнеры Flovac совместно с различными устройствами для аспирации можно объединять в **Аспирационную тележку Flow Meter** – компактную и функциональную отсасывающую систему. Система позволяет конфигурировать различные вакуумные аспирационные устройства в соответствии с конкретными задачами и условиями применения.

#### Комплектующие для одноразовой аспирации

##### Гидрофобный фильтр

Гидрофобный фильтр состоит из 3 слоев, выполняющих антибактериальную, противодымную и гидрофобную функции. При намокании фильтр прерывает процесс аспирации, поскольку жидкость достигает максимального уровня сбора. При нормальных условиях аспирации фильтр работает с максимальной эффективностью, обеспечивая бактериальную и вирусную защиту больничной вакуумной установки. Во влажном состоянии он становится непроницаемым барьером, останавливающим процесс аспирации, в том числе при отсасывании


пены или хирургического дыма, которые попадают на фильтр.

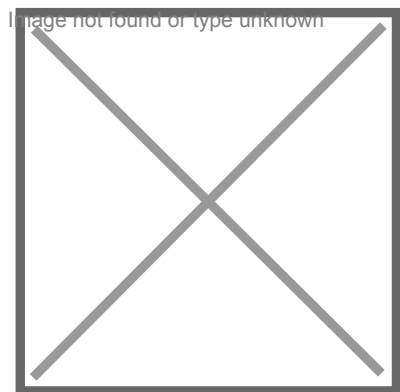

### **Механический клапан**

Механический клапан работает как запорный клапан и останавливает всасывание, когда емкость заполнена.


Плавающий клапан поставляется в сочетании с антибактериальным фильтром, обеспечивающим дополнительную защиту для больничной вакуумной установки.

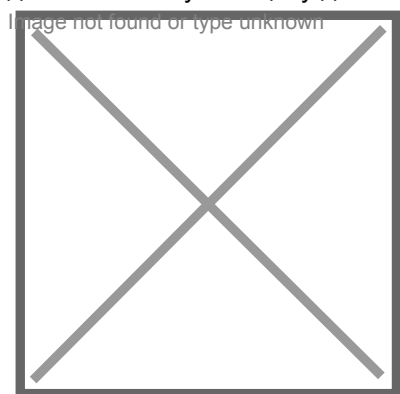

### **Набор для желирования**

Набор для желирования – это специальный абсорбирующий порошок, превращающий жидкости в полутвердую массу. Он позволяет поглощать и впитывать все жидкости, всасываемые в емкости, и предотвращать опасные риски заражения для медицинского персонала в случае случайной утечки биологических жидкостей.

Необходимое количество желирующего порошка поставляется в небольших водорастворимых пакетиках, уже вложенных в мягкий пакет.

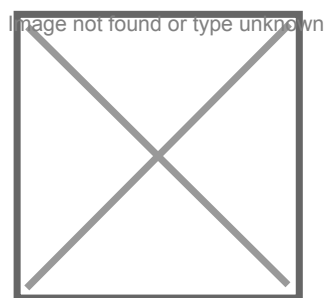

## Технические характеристики

|                 |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Материал крышки | HDPE - полиэтилен высокой плотности                     |
| Порт ВАКУУМ     | Female, конический                                      |
| Порт ПАЦИЕНТ    | Male, □14.0-15.5 мм (с угловым коннектором □8.0-9.2 мм) |
| Порт ТАНДЕМ     | Male, □8.0-9.2 мм                                       |
| Макс. вакуум    | -950 мбар                                               |
| Трубка вакуума  | Внутренний □6 мм, длина до 1.8 м                        |
| Трубка пациента | Внутренний □6 мм, длина до 2.5 м                        |