

## Гель для отбеливания, реминерализации и фторирования эмали зубов «Белгель О вайт» 6%

ИМ-7.113112

гель, для отбеливания

ВладМиВа Опытно-экспериментальный завод ЗАО,  
Россия



### Характеристики

---

Тип	гель
Применение	для отбеливания
Форма выпуска	- гель (ручка-кисточка) - 2,5 мл; - гель Ca/P - 2,5 мл; - ретрактор - 1 шт.

### Дополнительные характеристики

---

«Белгель О» вайт - универсальная отбеливающая гелевая система, в состав которой в качестве отбеливающего агента, входит перекись водорода 6,67%.

Перед процедурой отбеливания рекомендуется высушить зубы при помощи салфеток.

Поместить ретрактор в полость рта.

Аккуратно нанести тонкий слой геля на переднюю поверхность зубов, избегая попадания на десны и губы.

Подождать, в течение 30 секунд, пока отбеливающее вещество не подсохнет, удалить ретрактор. Гель оставить в течение 5-10 минут, затем прополоскать рот водой.

При необходимости повторить процедуру отбеливания, но не чаще 3 раз в день. После 2-3 дней применения отбеливающего

средства рекомендуется использовать реминерализующее средство «Белгель Ca/P».

Для достижения большего эффекта в период отбеливания, рекомендуется в течение часа после применения геля избегать приема пищи, напитков, или курения. При возникновении зубной чувствительности или раздражения дёсен прекратить процедуру отбеливания и проконсультироваться со стоматологом.