

Клипсы хирургические титановые КХЛ-ТЕТ

ИМ-7.92763/2210

титан, М / ML / L, в кассете 4 шт. / 6 шт.

ТЕТ ООО, Россия



Харктеристики

Материал	титан
Размер	М / ML / L
Количество в кассете	4 шт. / 6 шт.

Описание

Клипсы хирургические титановые КХЛ-«ТЕТ» предназначены для наложения на кровеносные сосуды и желчные протоки при лапароскопических операциях – для их сжатия (перекрытия, лигирования). Клипсы имеют V-образную форму, изготовлены из проволоки титанового сплава BT1-00; насечки на внутренней поверхности препятствуют соскальзыванию клипсы с места наложения.

Применяются для артерий и вен, отвечающих за кровоснабжение органов и относящихся к центральной системе кровообращения. Клипсы не предназначены для извлечения или замены после операции и остаются в теле пациента пожизненно.

Парамагнитные свойства титана позволяют проводить МРТ-исследования пациентам с наложенными клипсами без искажения результатов.

Типоразмеры клипс

Типоразмер	Диаметр сосудов	Масса клипсы
Средние	1.0-2.5 мм	0.01 г
Средне-большие	2.0-4.0 мм	0.04 г
Большие	3.5-6.5 мм	0.05 г

Наложение клипсы на сосуд выполняется клипсаппликатором механическим сдавливанием и занимает 1-2 секунды. Клипсы рекомендуется использовать с клипсаппликаторами производства ЗАО «Аксиома-Сервис»: модель 2505 – для средних клипс, модель 2605 – для средне-больших и больших.

Комплектность:

- клипсы одного типоразмера – 6 шт. (4 шт. для больших клипс);
- магазин для укладки клипс – 1 шт.;
- стерилизационный пакет – 1 шт.

Стандартные варианты поставки:

- клипсы средние – 10 магазинов;
- клипсы средне-большие – 20 магазинов;
- клипсы большие – 10 магазинов.

Клипсы стерильны, предназначены для однократного применения и не подлежат повторной стерилизации.
Срок хранения – 24 месяца со дня стерилизации.