

Комплект паст стоматологических рентгеноконтрастных бактерицидных для пломбирования корневых каналов «Иодент» твердеющий

ИМ-7.115271

паста, для лечения пульпита / для пломбирования корневых каналов

ВладМиВа Опытно-экспериментальный завод ЗАО,
Россия



Характеристики

Тип	паста
Применение	для лечения пульпита / для пломбирования корневых каналов
Форма выпуска	паста твердеющая 25 г

Дополнительные характеристики

Твердеющая паста применяется для пломбирования каналов зубов при пульпитах, острых и хронических периодонтитах, для пломбирования каналов молочных зубов и не препятствует образованию нижележащего зубного зачатка. Следует применять с предосторожностью при лечении детей младше 7 лет (паста имеет камфоро-ментоловую основу).

Состав:

- хлорфенол, антисептик ряда фенола;
- камфора, смягчающая воздействие фенолов на организм;
- иодоформ, обеспечивающий длительное антимикробное воздействие материала в канале;
- пастообразователь гидрофобного характера;
- наполнитель, стимулирующий образование костных остеобластов на уровне апекса, а также обеспечивающий рентгеноконтрастность материала.

Структурирование твердеющей пасты происходит в канале от внутриканальной влаги в течение 72 часов.

Применение твердеющей пасты Иодент снижает возможность осложнений и болевой реакции после пломбирования, так как обе пасты имеют единую антисептическую основу.

При выведении пасты Иодент за апекс возможны незначительные болевые ощущения. В мягких тканях паста рассасывается.