# medca+alog

# Пластыри мозольные ГалтеяФарм от сухих мозолей

ИМ-7.101993/2010 до 22.10.2025

пластырь, мозольный, нестерильный, основа тканевая, 6×10 см

ГАЛТЕЯФАРМ ООО, Беларусь



#### Характеристики

Исполнение пластырь

Тип мозольный

Вид нестерильный

Основа тканевая

Размер 6×10 см

#### Дополнительные характеристики

Назначение: для размягчения и лечения сухих мозольных образований.

**Основа:** 100 % хлопок.

Действующее вещество: салициловая кислота.

Срок годности: 4 года.

### Размеры и количество в упаковке:

6×10 см (50 шт. / 2200 шт.)

**Принцип действия:** входящая в состав клеевой массы салициловая кислота способствует отторжению ороговевших клеток, препятствует развитию микробов.

Лейкопластырь способствует разрыхлению и отшелушиванию ороговевшего слоя кожи. Мозоли размягчаются и через некоторое время могут быть безболезненно удалены.

## Способ применения: наружно.

Открыть пакет, вынуть лейкопластырь, отрезать полоску необходимого размера, снять с ее поверхности защитную пленку (бумагу).

Приклеить к предварительно распаренной сухой мозоли.

При необходимости зафиксировать фиксирующим лейкопластырем.

Через 1-2 дня снять лейкопластырь, мозоль после повторного распаривания осторожно удалить.

Если мозоль не размягчилась, наложение лейкопластыря повторить в том же порядке.

Лечение проводят до полного удаления мозолей.

При выявлении повреждений здоровой кожи, их необходимо заклеить бактерицидным лейкопластырем.

| Противопоказания: не допускается наложение мозольного лейкопластыря на здоровую или поврежденную кожу. |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |