

## Пластырь ГалтеяФарм обезболивающий с ментолом

ИМ-7.101993/2010 до 22.10.2025

пластырь, лечебный, нестерильный, основа тканевая,  
6×10 см / 10×15 см, обезболивающий

ГАЛТЕЯФАРМ ООО, Беларусь



### Характеристики

Исполнение	пластырь
Тип	лечебный
Вид	нестерильный
Основа	тканевая
Размер	6×10 см / 10×15 см
Обезболивающий	Да

### Дополнительные характеристики

**Назначение:** как отвлекающее и обезболивающее средство при головной боли, мигрени; как средство первой помощи при растяжениях, ушибах и гематомах, спортивных травмах без повреждения кожных покровов; для облегчения боли при радикулите, люмбаго, миозите, ревматизме.

**Основа:** 100 % хлопок.

**Срок годности:** 4 года.

#### Размеры и количество в упаковке:

- 6×10 см (50 шт. / 2700 шт.)

- 10×15 см (50 шт. / 1500 шт.)

**Принцип действия:** в состав пластырной массы входит ментол рацемический, который обладает легким местным обезболивающим действием. При попадании на кожу он вызывает раздражение нервных окончаний, что сопровождается ощущением холода, легкого покалывания и в свою очередь снижает болевую чувствительность, имеет эффект отвлечения.

**Способ применения:** наружно.

Открыть пакет, вынуть лейкопластырь, снять с его поверхности защитную пленку (бумагу) и приклеить к сухой чистой коже в месте болевого ощущения, слегка прижимая. Использовать однократно. Время непрерывного применения лейкопластырей не более 2 суток.

**Противопоказания:** не рекомендуется применять лейкопластырь при: гиперчувствительности, открытых ранах. Перед применением лейкопластыря детьми до 3-х лет необходимо проконсультироваться с врачом.