

## Манекен-тренажер Laerdal Nursing Kelly для отработки навыков ухода за пациентом

манекен, многофункциональное назначение

Laerdal, Норвегия



### Характеристики

---

Тип	манекен
Назначение	многофункциональное назначение
Режим работы	учебный

### Дополнительные характеристики

---

**Артикул:** 300-05050.

**Манекен Nursing Kelly** - манекен для отработки навыков ухода за пациентом в условиях стационара. Предназначен для имитации и освоения навыков всего комплекса оценки состояния и процедур ухода за больным, включая оценку и обработку ран, аускультацию шумов и измерение артериального давления. Данный манекен - манекен взрослого мужчины - является полноценным тренажером для освоения навыков ухода.

#### Навыки:

- транспортировка и перекладывание больного;
- уход за пальцами рук и ног;
- наложение повязок;
- промывание глаз, введение глазных капель;
- промывание ушей, введение ушных капель;
- тампонада полости носа, введение назальных капель;
- уход за полостью рта;
- аспирационная санация дыхательных путей;
- введение кислородной назальной канюли;
- введение оро- и назофарингеальных воздуховодов;
- оро- и назотрахеальная интубация;
- уход за трахеостомой;
- постановка и удаление назогастрального зонда, промывание желудка, зондовое кормление;
- пальпация пульса на сонной артерии;
- внутривенные инъекции в локтевой ямке и на тыльной поверхности кисти;
- уход за подключичным катетером;

- внутримышечные инъекции;
- катетеризация мочевого пузыря;
- постановка клизмы;
- вагинальный душ;
- уход за стомами;
- измерение артериального давления;
- пальпация пульса на плечевой и лучевой артериях;
- аускультация сердца, легких и кишечника;
- оценка показателей жизнедеятельности.

### **Характеристики:**

1. Манекен содержит имитацию верхних дыхательных путей, легких, пищевода и желудка.
2. Ручная имитация пульсации на сонной артерии (резиновая груша).
3. Правая рука манекена содержит имитацию системы поверхностных вен:
  - медиальная подкожная вена (v. basilica);
  - латеральная подкожная вена (v. cephalica);
  - срединная локтевая вена (v. mediana cubiti).
4. Участки для внутримышечных инъекций в плечо, бедро (билатерально), ягодичную и ветроглютеальную области.
5. Сменные генитальные вставки с мочевым и кишечным резервуарами позволяют отрабатывать постановку мочевого катетера у мужчин и женщин и постановку клизм.
6. Сменные модели стом (колостома, илеостома, надлобковая цистостома) для ухода.
7. Манекен имеет возможность подключения управляющего устройства (планшет инструктора SimPad PLUS, входит в комплект), а также имитатора.
8. Прикроватного монитора для наблюдения за показателями жизнедеятельности пациента (не входит в комплект).
9. Возможность измерения АД с аускультацией тонов Короткова и пальпацией пульса.
10. Уровни систолического и диастолического давления регулируются независимо настраиваемый уровень громкости возможность имитации аускультативного провала тоны и пульсация синхронизированы с ЭКГ сила пульса зависит от уровня АД.
11. Встроенные динамики позволяют проводить аускультацию шумов пациента в норме и при различных патологиях:
  - звуки сердца синхронизированы с ЭКГ: норма / аортальный стеноз / шум трения перикарда / шум Остина-Флинта / диастолический шум при митральном стенозе / систолический шум / пролапс митрального клапана / щелчок открытия митрального клапана;
  - звуки дыхания синхронизированы с настраиваемой ЧДД (0-60 в мин.): норма / крупнопузырчатые хрипы / мелкопузырчатые хрипы / пневмония /стридор / свистящие хрипы / шум трения плевры / сухие хрипы / независимый выбор звуков для правого и левого легких;
  - звуки кишечника / норма /урчание / усиление перистальтики / ослабление перистальтики /отсутствие перистальтики;
  - возможность воспроизведения голосовых звуков (кашель, рвота, стоны, крик, одышка, да/нет).

### **Манекен для отработки навыков ухода NURSING KELLY включает:**

Манекен взрослого мужского тела, набор для ухода за ранами, рука для измерения артериального давления, больничная одежда, смазка для манекена, набор инструментов для сборки и инструкции по использованию. (Манекену для отработки навыков ухода Nursing Kelly требуется имитатор жизненных признаков VitalSim (продается отдельно) для функций артериального давления, пульса и звуковых эффектов.)

### **Дополнительно:**

300-05050 - Nursing Kelly (с возможностью подключения симулятора ВиталСим, рукой для измерения АД, головой для интубации, рукой для в/в инъекций);  
300-20050 - Nursing Kelly (базовый набор с головой для интубации и рукой для в/в инъекций);  
301-00001 - Patient Kelly (базовый набор - транспортировка, в/м инъекции (бедро), уход и промывание колостомы, катетеризация мочевого пузыря (муж. и жен.), клизмы).