

## Материал для химико-механической обработки кариозных полостей зубов без бормашины «Кариклинз»

ИМ-7.7065/1610 до 10.10.2021

гель, для размягчения кариозного дентина

ВладМиВа Опытно-экспериментальный завод ЗАО,  
Россия



### Характеристики

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Тип           | гель                                 |
| Применение    | для размягчения кариозного дентина   |
| Форма выпуска | - гель №1 - 3 г;<br>- гель №2 - 3 г. |

### Дополнительные характеристики

Набор гелей «Кариклинз» предназначен как в детской, так и во взрослой стоматологии для размягчения кариозного дентина при среднем кариесе и кариесе корня, без повреждения здорового дентина.

Материал «Кариклинз» представлен двумя гелями для последовательного применения. Гель №1 содержит комплексообразователь твердых тканей, предназначенный для растворения деструктурированных минеральных компонентов кариозного дентина. Комплексообразователь растворяет нестойкие кальцийфосфаты и оксиапатит, при этом не повреждая здоровый дентин. В состав геля №1 входит антисептик – цетримид, проявляющий активное действие в отношении грамположительных, грамотрицательных и анаэробных бактерий.

Основное действующее вещество Геля №2 гипохлорит натрия –растворяет обнажённые коллагеновые волокна (органическую часть дентина). Благодаря размягчающему эффекту гелей, повреждённый и здоровый дентин становятся клинически легко делимыми. Кариозно-повреждённый дентин можно эффективно и безопасно удалить с помощью специальных атравматических инструментов набора «Кариклинз», имеющих различную геометрическую форму рабочей части и угол заточки режущих граней 90°.

Атравматическая прямоугольная заточка режущих кромок инструментов позволяет отнести их к «вычищающим», а не «вырезающим» и снижает риск удаления здорового дентина. При совместном использовании гелей и инструментов «Кариклинз» достигается максимальный результат химико-механического препарирования кариозных полостей. Применение гелей при кариесе эмали не эффективно.

Данный метод обеспечивает бесшумную обработку кариозной полости и психологически спокойное лечение детей, беременных женщин, пациентов с повышенной болевой чувствительностью и противопоказанием к применению местноанестезирующих препаратов, а также эффективен в случаях, где необходимо максимальное сохранение твердых тканей зуба.