

Материал-паста безмышьяковистая для девитализации пульпы зуба «Девит-П»

ИМ-7.98206/2205

паста, для лечения пульпита

ВладМиВа Опытно-экспериментальный завод ЗАО,
Россия



Характеристики

Тип	паста
Применение	для лечения пульпита
Форма выпуска	паста 3 г

Дополнительные характеристики

Предназначена для девитализации пульпы и мумификации молочных зубов в случаях, когда экстирпацию пульпы можно исключить.

Девитализирующая паста «Девит-П» содержит:

- параформ — антисептик, коагулирующий альбумины, обеспечивая девитализацию пульпы;
- лидокаина гидрохлорид, локально анестезирующий и снижающий опасность возникновения болезненных реакций;
- хлорфенол, камфору и ментол - компоненты, усиливающие антисептическое действие препарата;
- пастообразователь и наполнитель, придающий пасте волокнистую структуру.

Девитализация пульпы временных зубов сопровождается эффективной стерилизацией, что делает возможным не удалять пульпу и избежать болезненной для ребенка процедуры.

Полная девитализация пульпы происходит за 3-5 дней. Если пациент не ощущает боли, постоянное пломбирование можно проводить уже через 24-48 часов после применения пасты.