

Материал-паста стоматологическая для девитализации пульпы зуба методом мортальной экстирпации «Девит-Арс»

ИМ-7.98206/1610 до 10.10.2021

паста, для лечения пульпита

ВладМиВа Опытно-экспериментальный завод ЗАО,
Россия



Характеристики

Тип	паста
Применение	для лечения пульпита
Форма выпуска	- паста 3.0 г / 6.5 г; - паста 100 унидоз по 4 мг.

Дополнительные характеристики

Предназначена для быстрой и безболезненной девитализации пульпы зуба методом мортальной экстирпации. Применять только в стоматологии.

Материал Девит-АРС представляет собой готовую к применению пасту, содержащую:

- мышьяковистый ангидрид (30 %), обеспечивающий быстрый и неагрессивный некроз пульповых волокон;
- лидокаина гидрохлорид, делающий процесс девитализации безболезненным, снижая чувствительность тканей;
- эвгенол - антисептик широкого спектра действия;
- волокнистый наполнитель и пастообразователь, обеспечивающие пластичность материала и одновременно его дискретность.

□

Девитализация пульпы происходит в течение 24-48 часов в зависимости от строения зуба (однокорневой или многокорневой), дозировки пасты, а также плотности слоя дентина, покрывающего пульпу при непрямом контакте пасты с ней.

Время нахождения препарата в полости зуба не должно превышать 72 часов.