medca+alog

Материал стоматологический цинкоксидэвгенольный «Эодент» быстротвердеющий

ИМ-7.112911

подкладка при пломбировании, универсальный

ВладМиВа Опытно-экспериментальный завод ЗАО, Россия



Характеристики

Тип подкладка при пломбировании

Назначение универсальный

Форма выпуска - порошок (25 г);

- жидкость (8 мл).

Дополнительные характеристики

Назначение:

Применяют в качестве изолирующей подкладки под все виды пломб, кроме композитных, для временной фиксации коронок, а также для временного пломбирования при лечении кариеса.

Состав и основные свойства:

Материал «Эодент» быстротвердеющий выпускается в комплекте порошок/жидкость. Порошок содержит окись цинка, гидроксиапатит, стимулирующий регенерацию костной ткани, и рентгеноконтрастный наполнитель. Жидкость содержит эвгенол с пластифицирующими добавками, обеспечивающими высокую наполненность системы порошок-жидкость (3-4:1) при замешивании и низкую растворимость материала (не более 0,5%). В жидкость введен катализатор, способствующий отверждению цемента в полости зуба в течение 4-6 минут. «Эодент» быстротвердеющий характеризуется продолжительным рабочим временем (6-8 часов), высокой пластичностью, длительным временем отверждения (48-72 часа) и хорошей запечатывающей способностью, обладает пролонгированным антимикробным действием, технологичен и при необходимости без особых усилий может быть удален из канала. Материал «Эодент» (быстротвердеющий) характеризуется хорошим краевым прилеганием и низкой растворимостью.