

Набор реагентов ТС Тех-D-димер-тест

ИМ-7.114774

система открытая, D-димер

Фирма Технология-Стандарт ООО, Россия



Характеристики

Система	открытая
Параметр определения	D-димер
Назначение	определение D-димера в плазме крови

Описание

Тех-D-димер-тест – набор реагентов для качественного или полуколичественного определения D-димера в плазме крови человека.

Комплектации:

- Тех-D-димер-тест 45 (Артикул 798) – на 45 определений
- Тех-D-димер-тест 85 (Артикул 799) – на 85 определений
- Тех-D-димер-тест 130 (Артикул 800) – на 130 определений

Принцип метода

В тесте используются моноклональные антитела, специфичные к D-димеру фибрина, но не к фибриногену и продуктам его деградации. Антитела связаны с частицами латекса, поэтому при смешивании на горизонтальной поверхности латексной суспензии с плазмой, содержащей D-димер, появляется видимая агглютинация.

Состав набора:

1. Латексный реагент (суспензия латексных частиц, покрытых моноклональными антителами к D-димеру)
2. Позитивный контроль (лиофилизированная плазма с высоким уровнем D-димера)
3. Негативный контроль (лиофилизированная плазма, не содержащая D-димер)
4. Солевой буфер
5. Пластина тестовая (на 6 тестовых ячеек) – 8 шт.
6. Палочка для перемешивания – 25 шт.