

Набор реагентов TS-Фактор IX

М-7.113063

система закрытая, для анализаторов Technology Solution, фактор IX

Фирма Технология-Стандарт ООО, Россия



Характеристики

Система	закрытая
Для анализаторов	Technology Solution
Параметр определения	фактор IX

Описание

Медицинское изделие «TS-Фактор IX» предназначено для определения активности фактора IX в плазме крови на линейке полуавтоматических и автоматических коагулометров «Technology Solution». Определение фактора IX используется для диагностики гемофилии В, для контроля заместительной терапии больных гемофилией В концентратами фактора IX.

Каталожный номер: 863

Параметр определения: определение активности фактора IX в плазме крови

Фасовка: 20-40 определений

Принцип метода

Определяют время свертывания плазмы крови в смеси, содержащей дефицитную по фактору IX плазму, разведенную исследуемую плазму и АПТВ-реагент, в присутствии ионов кальция. Количественное определение активности фактора IX выполняют по графику зависимости активности фактора IX (в %) от времени свертывания с АПТВ-реагентом.

Состав набора:

1. АПТВ-реагент (жидкий реагент), 2.5 мл – 1 фл.
2. Кальция хлорид (рабочий раствор), 10 мл – 1 фл.
3. Калибровочная плазма (лиофильно высушенная), на 1 мл – 1 фл.
4. Дефицитная по фактору IX плазма (лиофильно высушенная), на 1 мл – 3 фл.
5. Трис-буфер (рабочий раствор), 10 мл – 1 фл.