

Ортез (фиксирующая шина) коленного сустава ORTEX 03A

ИМ-7.102135/2003 до 05.03.2025

ортез / шина, для нижних конечностей, фиксация
ремень с текстильной застежкой, размер XS / S / M / L
/ XL / XXL

Ortex spol. s.r.o., Чехия



Характеристики

Вид	ортез / шина
Назначение	для нижних конечностей
Фиксация	ремень с текстильной застежкой
Материал	текстиль
Размер	XS / S / M / L / XL / XXL

Дополнительные характеристики

Показания: Ортез используется для фиксации коленного сустава в полной экстензии после травм связок коленного сустава и после операций в области коленного сустава. Полностью заменяет гипсовую фиксацию.

Область применения: ортопедия, травматология, нейрохирургия, хирургия, реабилитация.

Описание изделия: Шина состоит из одного главного текстильного элемента, который усилен двумя анатомическими профилированными задними усилителями и двумя боковыми усилителями, которые вставлены в съемные чехлы. Поэтому боковые шины можно разместить в правильную позицию в зависимости от объема конечности пациента. Усилители достаточно надежные, поэтому обеспечивают безопасную иммобилизацию коленного сустава в полной экстензии. После наложения ортеза коленная чашечка спереди окружена профилированным вырезом. Два крепежных ремня с текстильными застежками на бедренной части и два - на берцовой обеспечивают возможность легкого наложения и хорошую долговременную позицию ортеза. По окружности и стороне носки ортез является универсальным.

Противопоказания: при локальных дерматитах и гнойничковых инфекциях кожи.

Материалы: Шина состоит из одного главного текстильного элемента, который усилен двумя анатомическими профилированными задними усилителями и двумя боковыми усилителями, которые вставлены в съемные чехлы, на бедренной и на берцовой части имеются по две текстильных застежки.

Советы по уходу: бережная ручная стирка в обычном средстве при +40° C, без отжима. При стирке необходимо вынуть все металлические части. Изделие с текстильными застежками нужно стирать застегнутым.