


Пластырь ГалтеяФарм перцовый

ИМ-7.100489/2002 до 06.02.2025

пластырь, лечебный, нестерильный, основа тканевая,
6×10 см / 10×15 см, обезболивающий

ГАЛТЕЯФАРМ ООО, Беларусь

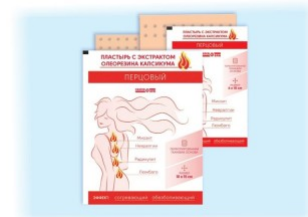

Характеристики

Исполнение	пластырь
Тип	лечебный
Вид	нестерильный
Основа	тканевая
Размер	6×10 см / 10×15 см
Обезболивающий	Да

Дополнительные характеристики

Назначение: пластырь предназначен для применения в медицинской практике и в быту в качестве обезболивающего средства при радикулите, невралгии (боли, распространяющейся по ходу нерва), миозите (воспалении мышц), люмбаго (приступообразной интенсивной боли в поясничной области) и т.п.

Основа: 100 % хлопок.

Срок годности: 3 года.

Размеры и количество в упаковке:

- 6×10 см (50 шт. / 2700 шт.)
- 10×15 см (50 шт. / 1500 шт.)

Принцип действия: благодаря содержанию экстракта олеорезина капсикума, перцовый пластырь обладает согревающим и обезболивающим эффектом. За счет жжения происходит ослабление боли.

Благодаря перфорации доступ воздуха к коже не затрудняется.

Пластырь не мешает движению и незаметен под одеждой.

Пластырь накладывается на чистую сухую кожу, предварительно обезжиренную спиртом или одеколоном.

Способ применения: наружно.

Перед наложением пластыря поверхность кожи обезжирить и насухо протереть. Открыть упаковку, снять с пластыря защитную пленку и приклеить в месте болевого ощущения, слегка прижимая.

Использовать однократно.

Время непрерывного применения пластыря – не более 2 суток.

При ощущении резкого жжения пластырь снять, кожу смазать кремом или вазелином.

Лечение пластырем можно повторить при необходимости несколько раз.

Повторно на одно и то же место пластырь рекомендуется использовать только после 2-3 суток перерыва.

Противопоказания: гиперчувствительность, нарушенная целостность кожных покровов, кожные заболевания различного происхождения.