

Повязка силиконовая пенная Yafho SILI-CARE Border

ИМ-7.118795

повязка, хирургический, противопрележневый,
стерильный, основа силикон, 7.5×7.5 см / 10×10 см /
12.5×12.5 см / 15×15 см / 10×20 см / 10×25 см / 10×30
см / 18×18 см / 23×23 см

Yafho Bio-Technology, Китай



Характеристики

| | |
|--------------------|--|
| Исполнение | повязка |
| Тип | хирургический |
| Противопрележневый | Да |
| Вид | стерильный |
| Основа | силикон |
| Размер | 7.5×7.5 см / 10×10 см / 12.5×12.5 см / 15×15 см / 10×20 см / 10×25 см / 10×30 см / 18×18 см / 23×23 см |

Описание

Повязка Yafho SILI-CARE Border – это современное стерильное адгезивное средство, представляющее собой многослойную силиконовую пенную повязку с фиксирующей каймой. Изделие разработано для эффективного лечения ран с экссудатом, обеспечивая оптимальный гидробаланс в раневом ложе и надежную защиту от внешних загрязнений.

Повязка выпускается в двух модификациях, различающихся по толщине основного пенного слоя:

- **SILI-CARE Border Lite (3 мм)** – облегченная версия для ран с умеренным уровнем экссудации.
- **SILI-CARE Border (5 мм)** – стандартная версия с повышенной впитывающей способностью для ран с обильной экссудацией и обеспечения дополнительной амортизации.

Пятислойная структура изделия:

- **Верхний защитный слой** – полупроницаемая полиуретановая пленка, которая служит барьером для воды и бактерий, сохраняя при этом высокую паропроницаемость.
- **Суперабсорбирующий слой** – эффективно удерживает экссудат внутри, предотвращая мацерацию краев раны.
- **Связующий слой** – обеспечивает целостность структуры повязки.

- **Мягкий пенный слой** – поглощает вертикальные потоки жидкости и снижает давление на поврежденный участок.
- **Перфорированный силиконовый слой** – контактирует с кожей, обеспечивая бережную адгезию без травматизации грануляций при смене повязки.

Показания к применению:

- пролежни различной локализации;
- диабетические язвы стопы;
- венозные язвы нижних конечностей;
- хирургические и послеоперационные раны;
- травматические повреждения кожи;
- ожоги первой и второй степени.

Варианты исполнения и артикулы

| Артикул | Размер | Модификация |
|---------|--------------|-------------|
| 626475 | 7.5×7.5 см | Lite (3 мм) |
| 626410 | 10×10 см | |
| 626413 | 12.5×12.5 см | |
| 626455 | 15×15 см | |
| 626420 | 10×20 см | |
| 626425 | 10×25 см | |
| 626430 | 10×30 см | |
| 626418 | 18×18 см | |
| 626423 | 23×23 см | |
| 626375 | 7.5×7.5 см | |
| 626310 | 10×10 см | |
| 626313 | 12.5×12.5 см | |
| 626355 | 15×15 см | |
| 626320 | 10×20 см | |
| 626325 | 10×25 см | |
| 626330 | 10×30 см | |
| 626318 | 18×18 см | |
| 626323 | 23×23 см | |

Особенности эксплуатации:

- Стерилизация этиленоксидом (ЭО) гарантирует безопасность применения.
- Возможность оставаться на ране до 7 дней в зависимости от клинической картины.
- Смена повязки рекомендуется в случае визуализации экссудата на расстоянии 1.5 см от края повязки.
- Силиконовая кайма обеспечивает надежную фиксацию без необходимости использования дополнительных пластырей.