

Пробирка вакуумная Медбелрос с активатором свертывания и гелем

ИМ-7.112462/2308

активатор свертывания и гель, объем 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой код желтый, пластик

МИЗ МЕДБЕЛРОС ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	активатор свертывания и гель
Объем	1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	желтый
Материал	пластик

Описание

Пробирки вакуумные Медбелрос с активатором свертывания и разделительным гелем предназначены для получения сыворотки.

Инертный гель находится на дне пробирки. Масса этого вещества меньше массы кровяного сгустка и больше массы сыворотки. Во время центрифугирования гель поднимается вверх и формирует стабильный барьер, отделяющий сыворотку от фибрина и форменных элементов крови. Гель обеспечивает **разделение сыворотки и сгустка до 48 часов** без повторного центрифугирования. Пробирки с гелем необходимо центрифугировать не позднее, чем через 2 часа после взятия крови.

Наполнитель: активатор свертывания (SiO₂) + разделительный гель.

Материал для исследования: сыворотка.

Центрифугирование: 2000 г, 5 минут.

Код на этикетке: SG.

Размеры:

- 13×75 мм (объем крови от 1 до 6 мл);
- 13×100 мм (объем крови от 1 до 7 мл);
- 16×100 мм (объем крови от 7 до 10 мл).

Срок хранения: 18 месяцев.