

Пробирка вакуумная Vacutек Na фторид + Na гепарин

ИМ-7.111529 до 18.03.2027

для глюкозы, объем 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой код серый, пластик / стекло

Weihai Optech Medical Instruments Co., Китай



Характеристики

Тип	для глюкозы
Объем	2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	серый
Материал	пластик / стекло

Описание

Пробирки вакуумные Vacutек Na фторид + Na гепарин предназначены для определения уровня глюкозы.

Пробирки со стабилизатором глюкозы должны заполняться полностью до указанного на них объема, избыток оксалата в пробе может вызвать гемолиз.
После взятия пробы пробирки следует перемешать, переворачивая 6-8 раз. Поскольку пробирки с фторидом/оксалатом особенно подвержены гемолизу, их необходимо перемешивать с особой осторожностью.

Материал для исследования: плазма крови
Центрифугирование: 1300 g в течение 10 мин (центрифугирование следует производить сразу после взятия крови)

Объем	Размер	Наполнитель	Каталожный №	
			Пластик	Стекло
2 мл	13×75 мм	Na фторид + Na гепарин	VU08102P	VU08102G
3 мл			VU08103P	VU08103G
4 мл			VU08104P	VU08104G
5 мл			VU08105P	VU08105G
6 мл	13×100 мм		VU08206P	VU08206G
7 мл			VU08207P	VU08207G
8 мл	16×100 мм		VU08308P	VU08308G
9 мл			VU08309P	VU08309G
10 мл			VU08310P	VU08310G