

Пробирка вакуумная Vacutек с гепарином натрия

ИМ-7.111529 до 18.03.2027

гепарин натрия, объем 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой код зеленый, пластик / стекло

Weihai Optech Medical Instruments Co., Китай



Характеристики

Тип	гепарин натрия
Объем	2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	зеленый
Материал	пластик / стекло

Описание

Пробирки вакуумные Vacutек с гепарином натрия предназначены для получения плазмы, используемой в биохимических исследованиях.

Пробирки содержат реагент из расчета 12-30 МЕ гепарина на 1 мл крови.
Сразу же после заполнения пробирки и извлечения ее из держателя пробу необходимо тщательно перемешать путем переворачивания 8-10 раз.

Материал для исследования: гепаринизированная плазма
Центрифугирование: 1300 g в течение 10 мин (центрифугирование следует производить сразу после взятия крови)

Объем	Размер	Наполнитель	Каталожный №	
			Пластик	Стекло
2 мл	13×75 мм	Гепарин натрия	VH07102P	VH07102G
3 мл			VH07103P	VH07103G
4 мл			VH07104P	VH07104G
5 мл			VH07105P	VH07105G
6 мл	13×100 мм		VH07206P	VH07206G
7 мл			VH07207P	VH07207G
8 мл	16×100 мм		VH07308P	VH07308G
9 мл			VH07309P	VH07309G
10 мл			VH07310P	VH07310G