

Пробирка вакуумная Vacutек с КЗ ЭДТА

ИМ-7.111529 до 18.03.2027

КЗ ЭДТА , объем 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой код фиолетовый, пластик / стекло

Weihai Optech Medical Instruments Co., Китай



Характеристики

Тип	КЗ ЭДТА
Объем	2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	фиолетовый
Материал	пластик / стекло

Описание

Пробирки вакуумные Vacutек с КЗ ЭДТА предназначены для гематологических исследований.

Для обеспечения правильного соотношения кровь/антикоагулянт пробирка с КЗ ЭДТА должна заполняться точно до указанного объема (+10% от указанного на этикетке). Недостаток КЗ ЭДТА в пробе приводит к ее коагуляции, а избыточная концентрация ведет к сморщиванию клеток крови и искажению таких клинических показателей, как гематокрит, размер клеток и т.д.

Сразу после взятия крови в вакуумную пробирку с КЗ ЭДТА ее необходимо тщательно перемешать, переворачивая 8-10 раз. Недостаточное перемешивание также может привести к агрегации тромбоцитов, образованию микросгустков или коагуляции.

Материал для исследования: цельная кровь

Объем	Размер	Наполнитель	Каталожный №	
			Пластик	Стекло
2 мл	13×75 мм	К3 ЭДТА	VK08102P	VK08102G
3 мл			VK08103P	VK08103G
4 мл			VK08104P	VK08104G
5 мл			VK08105P	VK08105G
6 мл	13×100 мм		VK08206P	VK08206G
7 мл			VK08207P	VK08207G
8 мл	16×100 мм		VK08308P	VK08308G
9 мл			VK08309P	VK08309G
10 мл			VK08310P	VK08310G