

Средство дезинфицирующее Неодишер Септо Актив / Neodisher Septo Active

СГР RU.77.9988.002.Е.002853.08.19

дезинфекция ИМН + ПСО / ДВУ / стерилизация,
гранулы, основное АДВ пероксид водорода /
надуксусная кислота, рабочий раствор 7 суток, срок
годности 2 года



Dr. Weigert Systematic Hygiene, Германия

Общие параметры

Назначение	дезинфекция ИМН + ПСО / ДВУ / стерилизация
Форма выпуска	гранулы
Основное АДВ	пероксид водорода / надуксусная кислота
Состав	пероксид водорода - 8.5%, надуксусная кислота - 15%
Срок годности рабочего раствора	7 суток
Срок годности концентрата	2 года

Дезинфекция ИМН (режимы)

Вирулицидный (ИМН + ПСО)	1.0% - 10 мин / 2.0% - 5 мин
Туберкулоцидный (ИМН + ПСО)	1.0% - 30 мин / 2.0% - 15 мин

ДВУ и стерилизация (режимы)

Дезинфекция высокого уровня	2.0% - 10 мин
-----------------------------	---------------

Дополнительные параметры

Дерматофиты	Да
-------------	----

Дополнительные характеристики

Neodisher Septo Active – дезинфицирующее средство для ручной обработки термостабильного и термолабильного инструмента.

Ph-нейтральная, формула с приятным запахом, не содержит ароматизаторов

Форма выпуска: гранулы.

Действующее вещество: пероксид водорода - 8.5%, надуксусная кислота - 15%.

Срок годности рабочего раствора: 7 суток.

Срок годности концентрата: 2 года.

Область применения:

- дезинфекция, в том числе совмещенная с предстерилизационной очисткой ручным способом и в ультразвуковых установках;
- предстерилизационная очистка не совмещенная с дезинфекцией;
- предварительная очистка эндоскопов и инструментов к ним;
- окончательная очистка эндоскопов перед ДВУ;
- стерилизация ручным способом.

Фасовка:

- 100 г - пакеты саше (25 пакетов в коробке);
- 2 кг / 8 кг - пластиковый контейнер.