

Средство дезинфицирующее Санит Хлор

СГР ВУ.50.51.01.002.Е.000002.01.21

дезинфекция поверхностей, таблетки / гранулы,
основное АДВ натриевая соль дихлоризоциануровой
кислоты, рабочий раствор 8 суток, срок годности 5
лет, фасовка 1 кг

Санитарная оборона ЗАО, Беларусь



Общие параметры

Назначение	дезинфекция поверхностей
Форма выпуска	таблетки / гранулы
Основное АДВ	натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты
Состав	активный хлор 50-60%
Срок годности рабочего раствора	8 суток
Срок годности концентрата	5 лет
Фасовка	1 кг

Дополнительные параметры

Дерматофиты	Да
Возбудители паразитарных болезней	Да
Особо опасные инфекции	Да
Биологические выделения	Да
Кровь в сгустках	Да

Дополнительные характеристики

Санит Хлор - универсальное хлорсодержащее дезинфицирующее средство в виде гранул или таблеток.

Состав: натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты.

Срок годности рабочего раствора: 8 суток.

Срок годности концентрата: 5 лет.

Санит Хлор может выпускаться в виде Таблеток или Гранул.

Параметр	Санит Хлор таблетки	Санит Хлор гранулы
Массовая доля активного хлора	50 - 60%	50 - 60%
Масса одной таблетки	2.7 г	-
Масса активного хлора в одной таблетке	1.4 - 1.6 г	-

Назначение: дезинфекция поверхностей, дезинфекция ИМН и др.

Подробно назначение и режимы применения - в Инструкции.

Антимикробная активность:

- бактерицидная
- фунгицидная
- вирулицидная
- туберкулоцидная
- спороцидная
- овоцидная

Режимы	Поверхности	ИМН
Бактерицидный (кроме туберкулеза)	0.0075% - 60 мин 0.015% - 45 мин 0.03% - 20 мин 0.06% - 10 мин	0.06% - 80 мин 0.1% - 50 мин
Фунгицидный (кроме дерматофитий)	0.06% - 60 мин 0.1% - 30 мин 0.2% - 20 мин	0.06% - 80 мин 0.1% - 50 мин
Вирулицидный	0.0075% - 60 мин 0.015% - 45 мин 0.03% - 20 мин 0.06% - 10 мин	0.06% - 80 мин 0.1% - 50 мин
Туберкулоцидный	0.06% - 80 мин 0.1% - 50 мин 0.2% - 20 мин	0.2% - 55 мин 0.3% - 40 мин 0.6% - 20 мин
Дерматофитии	0.06% - 60 мин 0.1% - 30 мин 0.2% - 20 мин	-
Спороцидный	0.6% - 120 мин 1.2% - 60 мин	0.6% - 120 мин 1.2% - 60 мин
Овоцидный	0.3% - 100 мин 0.6% - 50 мин	0.3% - 100 мин 0.6% - 50 мин

*Концентрация рабочего раствора указана в % по активному хлору.