

Устройство обратной связи SkillGuide Laerdal для СЛР

устройство для контроля СЛР, для сердечно-лёгочной реанимации

Laerdal, Норвегия



Характеристики

Тип	устройство для контроля СЛР
Назначение	для сердечно-лёгочной реанимации
Режим работы	учебный

Дополнительные характеристики

Артикул: 170-30050.

Устройство SkillGuide Laerdal - это устройство обратной связи, которое анализирует действия по СЛР и отображает результаты в реальном времени, а также предоставляет итоговый отчет.

Характеристики:

Устройство предоставляет обратную связь на:

- глубину компрессий грудной клетки (недостаточная / достаточная);
- частоту компрессий (недостаточная / достаточная / чрезмерная);
- отпускание рук (наличие / отсутствие декомпрессии грудной клетки);
- положение рук (корректное / некорректное);
- объем вентиляций (недостаточный / достаточный / чрезмерный).

Таймер сессии запускается, когда вы начинаете СЛР, и останавливается, когда вы переходите в режим отчетов. Нажмите и удерживайте кнопку в течение одной секунды, чтобы выполнить сброс.

Нажмите кнопку, чтобы переключиться в другой режим (Доступные режимы: Режим результатов, Режим с ограниченным отображением, Режим отчетов).

В режиме результатов светодиодные индикаторы отображают результаты компрессии в реальном времени.

Время сеанса и неправильное положение рук (если это происходит) отображаются на экране.

В режиме с ограниченным отображением не отображаются результаты компрессий, только таймер сеанса.

В режиме отчетов светодиодные индикаторы и дисплей отображают сводную информацию по сеансу.