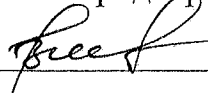


УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер  
РУП "Гродторгмаш"

  
В.М.Шкулепа  
25.04.2007

## КОРОБКИ СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ КСК


Паспорт

КСК 0.00ПС


Лист утверждения

КСК 0.00ПС - ЛУ


Главный технолог

  
П.П.Лобкис  
23.04.2007


Главный конструктор

  
Е.Н.Жаров  
19.04.2007


Начальник ОТК

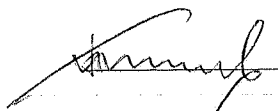

  
Ф.А. Печень  
23.04.2007

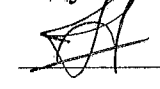Ведущий конструктор

  
Ю.А.Гусев  
19.04.2007

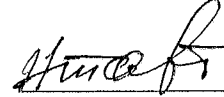Начальник БСС

  
Н.М.Таранко  
23.04.2007

| Инд. № подл. | Подп. и дата   | Взам. инв. № | Инд. № дубл. | Подп. и дата   |
|--------------|--|--------------|--------------|--|
| 27056        |  | 26.04.07     | 24642        |  |

Утвержден  
КСК 0.00ПС-ЛУ

⑪ ~~Открытое акционерное общество~~  
~~Республиканское унитарное предприятие~~

"Гродненский завод торгового машиностроения"  
230023, Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Тимирязева, 16

⑫

32.50.12.000

ОКП РБ 33.10.14.000

ОКП — 94.5120



⑬

## КОРОБКИ СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ КСК

Паспорт

КСК 0.00ПС

7 Зам. 312-07 *Обучен* 26.12.07

## 1 Назначение

Коробки стерилизационные круглые КСК-3, КСК-6, КСК-9, КСК-12, КСК-18 (далее - коробки) предназначены для размещения в них перевязочного материала, операционного белья, хирургического инструмента и других предметов медицинского назначения с целью стерилизации их в паровых медицинских стерилизаторах и доставки к месту использования, а также стерильного хранения в течение 3 суток.

Регистрационное удостоверение МЗ Республики Беларусь № ИМ-7.5619/1505 от 28.05.2015. Срок действия – до 28.05.2020.

Регистрационное удостоверение МЗ Республики Узбекистан № 01242/06/17 от 06.06.2017. Срок действия – до 06.06.2022.

Регистрационное удостоверение МЗ Республики Казахстан РК – ИМН – 5 № 001180 от 16.02.2018. Срок действия – до 16.02.2023.

Регистрационное удостоверение МЗ Кыргызской Республики Серия РМТ – 2015 – 125 КР – № 4053 от 20.03.2015. Срок действия – по 20.03.2020.

Регистрационное удостоверение МЗ и МП Туркменистана Серия ИМ – А № 013774 от 30.09.2016. Срок действия – по 30.09.2021.

## 2 Технические характеристики

| Наименование параметра          | КСК – 3 | КСК – 6 | КСК – 9 | КСК – 12 | КСК-18 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|----------|--------|
| Условный объем, дм <sup>3</sup> | 3       | 6       | 9       | 12       | 18     |
| Диаметр, мм, не более           | 175     | 245     | 275     | 325      | 390    |
| Высота, мм, не более            | 170     | 170     | 190     | 190      | 190    |
| Масса, кг, не более             | 0,8     | 1,1     | 1,3     | 1,7      | 2,2    |

## 3 Комплект поставки

Коробка, шт. 1  
Паспорт, шт. 1  
Упаковка, шт. 1

## 4 Подготовка коробок к работе

До начала применения, коробки должны подвергаться химической очистке дезинфекцией и предстерилизационной обработке в соответствии с действующими инструкциями Минздрава.

## 5 Свидетельство о приемке, упаковке и продаже

Коробка стерилизационная круглая КСК – \_\_\_\_\_ соответствует требованиям ТУ 92-00243346-04-93 "Коробки стерилизационные круглые КСК" и признана годной к эксплуатации.

Штамп ОТК \_\_\_\_\_ Дата упаковывания (изготовления) \_\_\_\_\_  
месяц, год

Продана \_\_\_\_\_  
наименование предприятия торговли

Дата продажи \_\_\_\_\_  
штамп магазина \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_

## 6 Гарантии изготовителя

6.1 Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи коробок.

6.2 В течение гарантийного срока изготовитель ремонтирует или заменяет коробки, или их составные части, пришедшие в негодность по вине изготовителя, при предъявлении настоящего паспорта с отметкой о дате продажи.

26 Зам. 9-18 *ff* 04.04.18

КСК 0.00ПС