

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**  
**Набор стоматологический для полирования и**  
**препарирования зубов**  
**методом абразивной струи**  
**«ФЛОУ-КЛИНЗ»**

для профилактической обработки зубов

ТУ 9391-011-67200978-2011

РУ № ФСР 2012/13178 от 29.09.2016 г.

## **ПОКАЗАНИЯ**

**Порошок № 1 Флоу-Клинз®-ПРОФИ** предназначен для удаления налета и мягких отложений с наддесневой поверхности зубов, с оголенного корня; очистки фиссур перед герметизацией; удаления пигментаций, налета курильщика и щадящего отбеливания эмали, не приводящих к гиперестезии зубов.

## **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Индивидуальная непереносимость. С осторожностью применять к пациентам с аллергическими реакциями на пищевые ароматизаторы.

Не использовать не по назначению.

## **ПОБОЧНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ**

При правильном хранении, транспортировании и соблюдении инструкции по применению побочные воздействия отсутствуют.

## **ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА**

**Порошок № 1 Флоу-Клинз®-ПРОФИ** применяется по методу пескоструйной обработки воздушно-водно-абразивной струей (Air-Flow). Порошок эффективно очищает твердые ткани, отбеливает и придает зубам здоровый блеск. В качестве абразивного компонента используется смесь карбоната и фосфата кальция с бикарбонатом натрия размером частиц 50-70 мкм, что позволяет провести щадящую чистку эмали. В составе содержится антислеживатель. Порошок выпускается с различными вкусами (мята, вишня, смородина, цитрус, мультифрукт) и нейтральный (без ароматизаторов).

## **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

**Порошок № 1 Флоу-Клинз®-ПРОФИ** применяют согласно инструкциям, прилагаемым к аппаратам пескоструйного типа для полирования зубов или к наконечникам импортного и отечественного производства.

Перед применением порошков необходимо врачу и пациенту защитить от пыли глаза очками и волосы одноразовой шапочкой, предупредить пациента с контактными линзами о возможном попадании пыли. Углы рта пациента следует обработать вазелином, поместить слюноотсос в угол рта пациента, использовать «пылесос».

Перед применением резервуар необходимо заполнить порошком на половину объема и подобрать режим подачи струи сжатого воздуха, воды и порошка, не направляя в полость рта пациента.

Не направляя струю порошка в одну точку, а распыляя круговыми движениями, следует обрабатывать каждую поверхность зуба не более 4 секунд.

***Избегать попадания влаги в порошок!***

***По окончании работы необходимо очистить наконечник от порошка! Не оставлять порошок в резервуаре!***

## **ФОРМА ВЫПУСКА**

Порошок № 1 (банка)	250 г
Инструкция по применению	1 шт.

## **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ**

Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от 5 °С до 25 °С.

Транспортировать при температуре от 5 °С до 25 °С.

Несоблюдение условий хранения и транспортирования ведет к ухудшению качества и сокращению срока годности материала, за что производитель ответственности не несет.

Храните материал в упаковке с инструкцией до окончания использования.

После вскрытия упаковки срок применения материала ограничен сроком годности.

Срок годности – 3 года от даты изготовления.

Медицинское изделие не подлежит техническому обслуживанию и текущему ремонту.

## **УТИЛИЗАЦИЯ**

Утилизация материала должна проводиться согласно общим правилам организации системы сбора, временного хранения и транспортирования отходов в ЛПУ (для безопасных отходов класса А).

## **АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ**

ООО «ТехноДент»

308570, Россия, Белгородская обл., Белгородский р-н,

п. Северный, ул. Березовая, д. 1/6

Тел/факс 8 800 350-09-73

E-mail: [info@tehnodent.org](mailto:info@tehnodent.org)

[www.tehnodent.org](http://www.tehnodent.org)

1.011.002-01\_RU\_002

Дата последней редакции: 2019-09