

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ

медицинского изделия: **Клей медицинский БФ-6**

ТУ У 24.4-00480951-001:2011

Производитель: Акционерное общество «Лубныфарм», Украина

### **Назначение**

Клей медицинский БФ-6 применяют для обработки микротравм: ссадин, царапин, порезов и других мелких повреждений кожи. А также для покрытия корня зуба при хирургическом лечении околокорневых зубных очагов инфекции: кист, гранулем.

### **Общая характеристика**

**Основные физико-химические свойства:** прозрачная или слегка мутная жидкость от светло-желтого до красноватого цвета.

Состав: спиртовой раствор модификации фенолоформальдегидной смолы, поливинилбутирала и канифоли, пластифицированный пластификатором - 25 г.

### **Лекарственная форма**

Жидкость для наружного применения.

### **Фармакотерапевтическая группа**

Код АТС V03A X. Тканевые клеи.

### **Способ применения и дозы**

Клей медицинский БФ-6 применяют местно для взрослых и детей. Перед нанесением препарата участок кожи тщательно очищают от загрязнений. Ватным или марлевым тампоном останавливают кровотечение и просушивают место, подлежащее покрытию клеем. Средство наносят на кожу тонким равномерным слоем до полного покрытия участка повреждения и прилегающих неповрежденных тканей (повязку не налаживают). В случае нарушения целостности пленки поверх нее повторно наносят клей. При хирургическом лечении околокорневых очагов инфекции корень зуба тщательно очищают от грануляции и оболочки кисты, останавливают кровотечение, просушивают и покрывают клеем пораженную часть корня зуба, не допуская затекания клея на кость. Через 1-2 минуты рану осушают, следя за заполнением околокорневого дефекта челюсти кровяным сгустком. Дальнейшее ведение послеоперационного периода обычное.

Пленка образуется в течение 2 - 5 минут после нанесения Клея медицинского БФ-6 и прочно удерживается на коже в течение 2-3 дней, а на верхушке корня зуба до 7 суток.

### **Побочные эффекты**

*Со стороны иммунной системы:* возможны аллергические реакции.

### **Противопоказания**

Индивидуальная повышенная чувствительность к препарату.

### **Передозировка**

Нельзя обрабатывать Клеем медицинским БФ-6 большую площадь поверхности кожи. При попадании возможна общая интоксикация организма. Лечение назначает врач.

### **Меры безопасности**

Клей медицинский БФ-6 не рекомендуется наносить на кожу без надобности или рекомендации врача. Для усиления лечебного действия рекомендуется высушивание обработанного участка на свежем воздухе. Бинтовать обработанный участок не нужно, это продлит время высыхания клея, ухудшит качество образованной пленки. Клей медицинский БФ-6 в своем составе содержит спиртовой раствор модификации фенолоформальдегидной смолы, поливинилбутирала и канифоли, поэтому *применение препарата у детей до 1 года противопоказано.*

### **Особенности применения**

Клей медицинский БФ-6 применяют только наружно! При попадании в глаза или на слизистые - немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

### **Применение в период беременности и лактации**

Применение Клея медицинского БФ-6 возможно в тех случаях, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка. В период лактации не рекомендуется использовать на молочных железах и кистях рук.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автомобилем или работе с другими механизмами**

Клей медицинский БФ-6 не влияет на скорость реакции при управлении автомобилем или работе с другими механизмами.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Клей медицинский БФ-6 не рекомендуется применять одновременно с любыми лекарственными средствами для наружного применения.

### **Фармакологические свойства.**

*Фармакодинамика.* Клей обладает ранозаживляющим и антисептическим действием. Используется как изолирующее средство, способствует заживлению мелких кожных ран, образуя на их поверхности изолирующую пленку. Пленка эластична и устойчива к механическим и химическим воздействиям. При нанесении на корень зуба изолирует микрофлору мелких корневых канальцев от продуктов деструкции тканей.

*Фармакокинетика.* Не изучалась в связи с низкой системной абсорбцией препарата.

### **Срок годности**

4 года.

### **Условия хранения**

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С, на расстоянии от нагревательных приборов и открытого огня.

*Хранить в недоступном для детей месте!* Не применять после окончания указанного срока годности.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Упаковка**

По 25 г во флаконах стеклянных.