

Перед выполнением печати


После подключения принтера к компьютеру (стр. 10) необходимо загрузить бумагу и красящую ленту, как описано ниже, прежде чем можно будет приступить к печати.

Загрузка красящей ленты

Примечание


В случае первого использования принтера термопечатающая головка может находиться в положении транспортировки. Не забудьте включить принтер и разблокировать головку, убрав ее из положения транспортировки, перед извлечением лотка красящей ленты. Не открывайте дверцу отсека красящей ленты, если на дисплее отображается сообщение “WAIT”:

- 1 Откройте дверцу отсека красящей ленты.

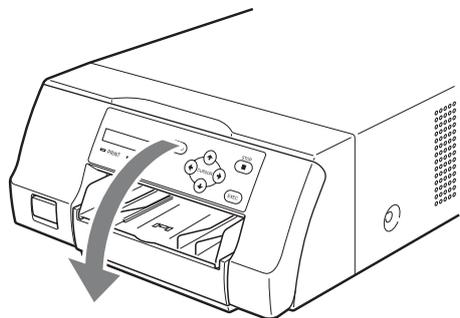

- 2 Установите рычаг выбора носителя в положение, соответствующее типу используемой красящей ленты. При первом использовании принтера или изменении типа используемой красящей ленты выполните следующие действия для изменения положения рычага выбора носителя.



- 1 Снимите крышку.

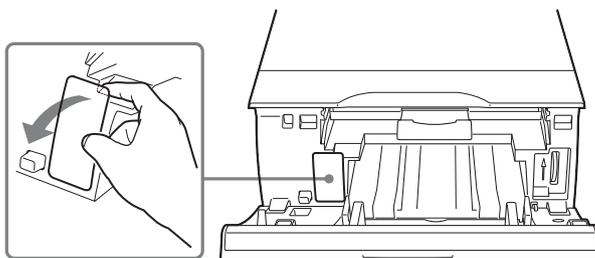

- 2 Установите рычаг выбора носителя в нужное положение.

UPC-21S/UPC-21L:
Рычаг смещен внутрь

UPC-24SA/UPC-24LA:
Рычаг смещен наружу

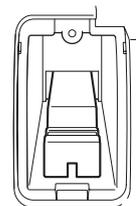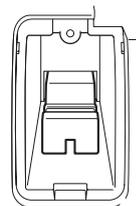


- 3 Установите крышку на место.

Примечание


Качество печати может ухудшаться при неправильном положении рычага выбора носителя. Убедитесь, что рычаг полностью смещен внутрь или наружу в зависимости от типа красящей ленты.

- 3 Выдвиньте лоток красящей ленты из принтера прямо вперед.

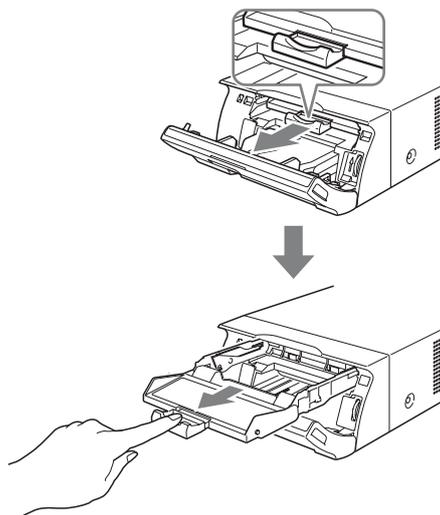

4 Загрузите красящую ленту.


- 1 Совместите два штырька на каждой из сторон красящей ленты с выемками в лотке красящей ленты.

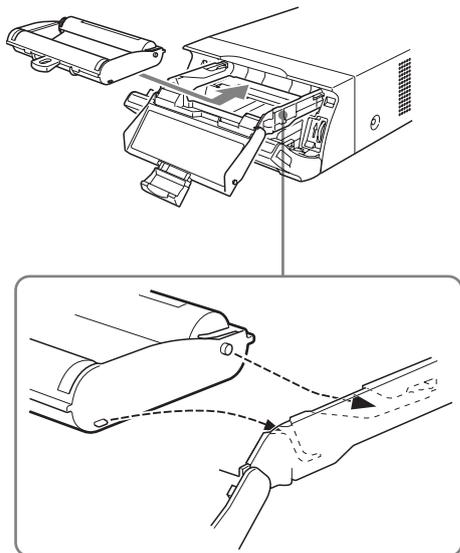


Примечания

- Убедитесь, что красящая лента загружается правильной стороной.

Правильно

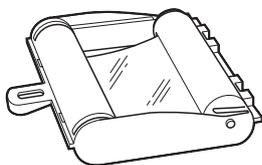

Неправильно

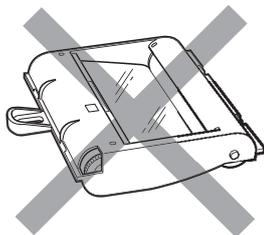


- Не перематывайте ручную красящую ленту перед загрузкой. Это может отрицательно сказаться на качестве печати.


- 2 Полностью задвиньте красящую ленту прямо вперед в лоток красящей ленты.

Примечание


Не касайтесь белых выступов по бокам лотка красящей ленты. Это может привести к неправильной загрузке красящей ленты.

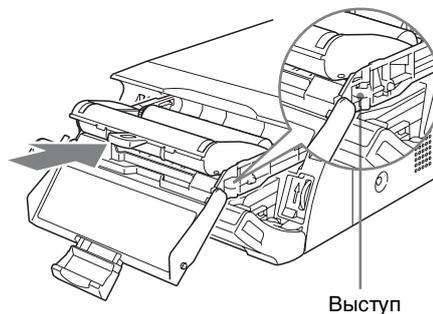

- 5 Полностью задвиньте лоток красящей ленты прямо вперед в принтер.

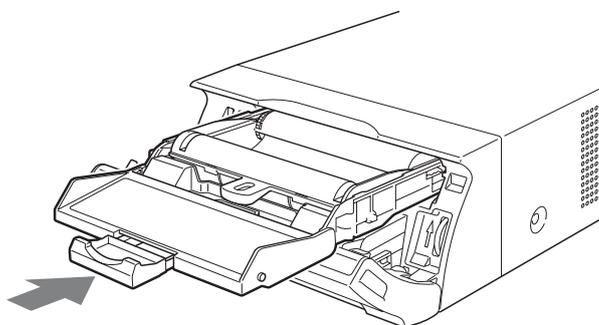

- 6 Закройте дверцу отсека красящей ленты.

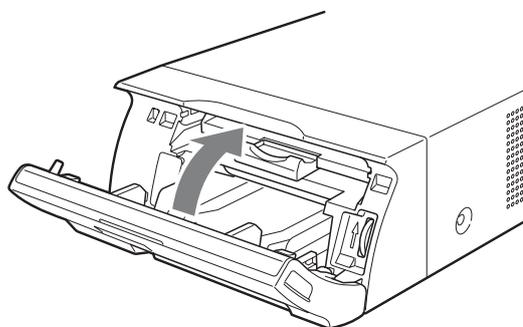

Извлечение лотка красящей ленты

Для извлечения лотка красящей ленты, например, для замены красящей ленты, выдвиньте лоток прямо вперед.

Повреждение красящей ленты во время использования

Для склеивания оборванной красящей ленты можно использовать целлофановую пленку или другой подобный материал, чтобы можно было использовать оставшуюся красящую ленту.



Перемотайте красящую ленту, чтобы целлофановая пленка полностью скрылась, повернув серое зубчатое колесо со стороны смотки в направлении стрелки (убедитесь, что красящая лента не провисает).

Загрузка бумаги


Чтобы загрузить бумагу в лоток подачи бумаги и вставить лоток в принтер, выполните описанные ниже действия.

При первом использовании принтера начните с шага 2.

Примечания

- Будьте осторожны и не касайтесь печатающей поверхности бумаги.
- Используйте только рекомендуемую для данного принтера бумагу. При использовании бумаги других типов возможно нарушение нормальной работы принтера, например, заедание бумаги. Подробнее о совместимых красящей ленте и бумаге см. в разделе “Красящая лента и бумага” на стр. 26.
- Появление сообщения “CHANGE RBN” на ЖК-дисплее означает, что красящая лента израсходована. Замените красящую ленту и загрузите новую бумагу в принтер.
- Будьте осторожны при вставке и извлечении лотка подачи бумаги, поскольку при этом можно сдвинуть принтер и он может упасть.


- 1 Нажмите в месте символа ▲ на лотке подачи бумаги для извлечения лотка.

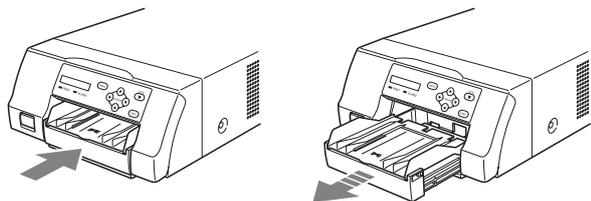


- 2 Откройте крышку лотка подачи бумаги и загрузите бумагу вместе с защитным листом печатающей стороной вверх.

При использовании наборов для печати UPC-21L и UPC-24LA


- ① Откройте лоток подачи бумаги.

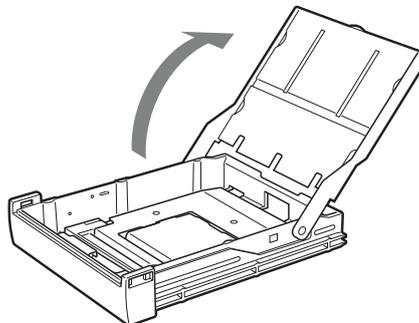

- ② Если перегородка лотка подачи бумаги поднята, опустите ее.

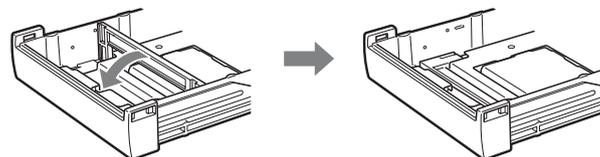


- ③ Аккуратно уложите и загрузите бумагу в лоток подачи бумаги, чтобы положение отметки “▲” на защитном листе совпало с отметкой “Δ” внутри лотка.

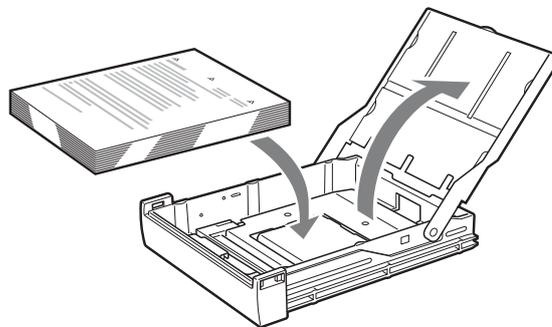


При использовании наборов для печати UPC-21S и UPC-24SA


- ① Откройте лоток подачи бумаги.

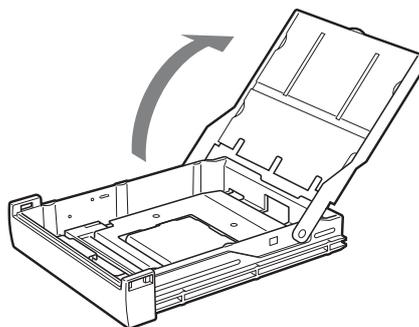

- ② Если перегородка лотка подачи бумаги опущена, поднимите ее.

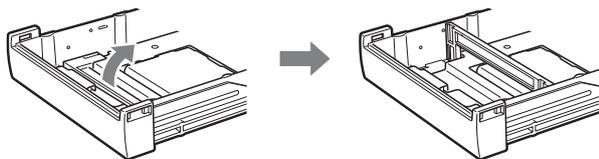


- ③ Аккуратно уложите и загрузите бумагу в лоток подачи бумаги, чтобы положение отметки “▲” на защитном листе совпало с отметкой “△” внутри лотка.

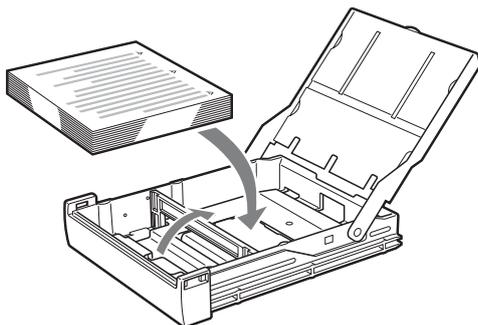

Примечания

- В случае израсходования бумаги нельзя просто добавить новую бумагу. Заменяйте одновременно и бумагу, и красящую ленту. При пополнении лотка бумагой в процессе использования красящей ленты возможно заедание бумаги.
- При обращении с бумагой не касайтесь печатающей стороны. Отпечатки пальцев и налипшая пыль могут способствовать загрязнению бумаги. Во избежание загрязнения печатающей стороны при обращении с бумагой не снимайте с нее защитный лист (с напечатанными предупреждениями).
- Загружайте бумагу правильно, чтобы она полностью помещалась в лотке подачи бумаги. Если бумага изогнута, она будет торчать из лотка подачи бумаги и подача бумаги может выполняться неправильно. Касаясь стопки бумаги сверху, дотрагивайтесь только до защитного листа, и перед использованием бумаги убедитесь, что она не изогнута.
- Не помещайте бумагу разных типов одновременно в лоток подачи бумаги.


- 3 Снимите защитный лист и закройте крышку.

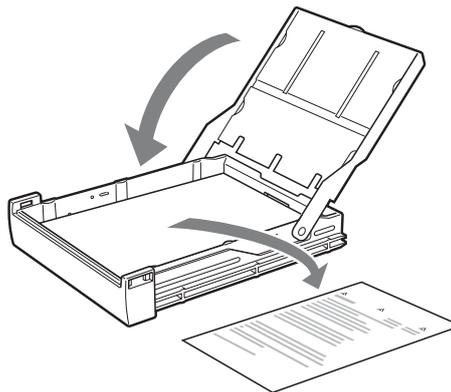

Примечание

Сохраните защитный лист после его снятия. Обратную сторону защитного листа (где ничего не напечатано) можно использовать в качестве листа для очистки термопечатающей головки. Подробнее об очистке см. в разделе “Очистка термопечатающей головки” на стр. 24.

- 4 Вставьте лоток подачи бумаги в принтер до щелчка.

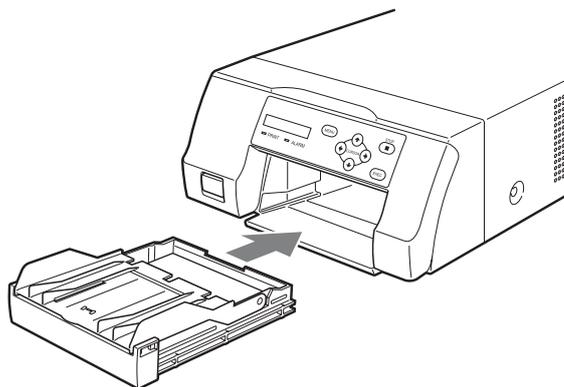


Примечания

- Если не удастся полностью вставить лоток подачи бумаги в принтер, проверьте место вставки лотка и уберите оттуда оставшуюся бумагу, если она там есть.
- Не допускайте скопления более 10 отпечатков. Если оставить слишком много отпечатков в выходном лотке, возможно заедание бумаги.


Установка ограничителя

При выдаче нескольких отпечатков скапливающиеся на лотке подачи бумаги отпечатки могут выпасть. Во избежание этого установите ограничитель на лоток подачи бумаги.

- 1 Нажмите в месте символа ▲ на лотке подачи бумаги и извлеките лоток.

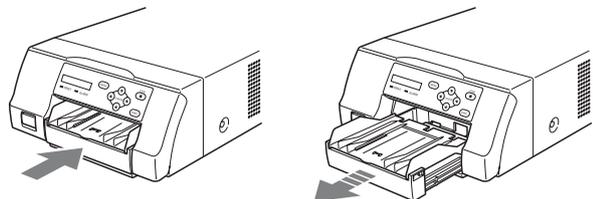

- 2 Поместите ограничитель в две прорези на крышке лотка подачи бумаги и полностью задвиньте его.

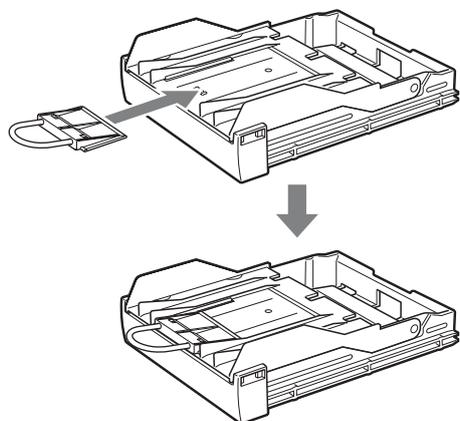

Примечание

Не вытягивайте ограничитель за металлическую часть.

Красящая лента и бумага



Не используйте повторно

Это может привести к нарушению работы принтера и отрицательно сказаться на результатах печати.

Набор для цветной печати UPC-21S

Содержит цветные красящие ленты и 240 листов бумаги, пригодные для высокоскоростной высокоточной печати, а именно:

- 3 красящие ленты, каждой из которых хватает для печати 80 листов
- 3 стопки бумаги (90 × 100 мм) по 80 листов

Набор для цветной печати UPC-21L

Содержит цветные красящие ленты и 200 листов бумаги, пригодные для высокоскоростной высокоточной печати, а именно:

- 4 красящие ленты, каждой из которых хватает для печати 50 листов
- 4 стопки бумаги (100 × 144 мм) по 50 листов в каждой

Самоламинирующийся набор для цветной печати UPC-24SA

Содержит цветные красящие ленты и 180 листов бумаги, пригодные для печати с ламинарованием, а именно:

- 3 красящие ленты, каждой из которых хватает для печати 60 листов
- 3 стопки бумаги (90 × 100 мм) по 60 листов

Самоламинирующийся набор для цветной печати UPC-24LA

Содержит цветные красящие ленты и 160 листов бумаги, пригодные для печати с ламинарованием, а именно:

- 4 красящие ленты, каждой из которых хватает для печати 40 листов
- 4 стопки бумаги (100 × 144 мм) по 40 листов

О наборе для цветной печати (UPC-21S/UPC-21L) и самоламинирующемся наборе для цветной печати (UPC-24SA/UPC-24LA)

Примечания

- При окончании бумаги заменяйте одновременно и бумагу, и красящую ленту.
- Используйте красящую ленту и бумагу из одной упаковки вместе. Не смешивайте с другими видами красящих лент и бумаги.
- Как и любая краска, краска, используемая в красящей ленте, может выцветать со временем. Мы не даем гарантии того, что цвета останутся неизменными, и продукт не может быть заменен по этой причине.

Хранение бумаги

- Избегайте хранения бумаги в местах с повышенной температурой, влажностью и запыленностью, а также местах, подверженных воздействию прямого солнечного света.
- Извлеките частично использованную бумагу и красящую ленту из принтера, запечатайте их в оригинальные пакеты и храните в прохладном темном месте. Во избежание конденсации, прежде чем снова распечатать и использовать бумагу и красящую ленту после хранения, дождитесь, пока они нагреются до комнатной температуры.

Примечания относительно сохранения отпечатков

- Храните отпечатки в прохладном темном месте.
- Не наклеивайте пластиковую ленту на отпечатки. Не оставляйте пластиковые резинки на отпечатках и не помещайте отпечатки между предметами, содержащими пластификаторы (настольными ковриками и т.п.).
- Избегайте попадания спирта и прочих летучих органических соединений на отпечатки.