

Единая система – три варианта комплектации

Basis



Данная модель выполнена из алюминия и может быть использована с одноразовыми фильтрами или фильтрами Aescular® из PTFE, рассчитанными на 1000 циклов стерилизации.

Многообразие выбора

Наши клиенты могут выбирать из трех различных систем крышек с единым корпусом контейнера.

Дополнительное преимущество: использование существующих корпусов Aescular® помогает сократить расходы на закупку.



Vario



Контейнеры Vario выполнены из алюминия и характеризуются дополнительной крышкой, устанавливаемой сверху на перфорированную, что делает их пригодными для безопасной транспортировки на большое расстояние и вне помещений.

При длительном хранении дополнительная крышка защищает фильтр от загрязнений.

Контейнеры Vario также можно использовать с одноразовыми фильтрами или фильтрами Aescular® из PTFE, рассчитанными на 1000 циклов стерилизации.



PrimeLine



Контейнеры PrimeLine являются самыми современными в линейке контейнеров Aescular®.

PrimeLine характеризуются крышкой из полимера со встроенной барьерной системой — постоянным фильтром, валидированным на 5000 циклов стерилизации. Таким образом, можно не беспокоиться о смене фильтров. Полимер, из которого изготовлена крышка PrimeLine, делает ее ударопрочной, устойчивой к царапинам, сколам и другим деформациям. Крышки не выцветают на протяжении всего срока службы.

Данный тип крышек также доступен в прозрачном пластике.

Принципы работы

Система контейнеров Basis



Система контейнеров BASIS состоит из корпуса контейнера и крышки с фильтрами.



Дополнительно контейнеры Basis могут быть укомплектованы верхней крышкой. После того, как крышки сняты с контейнера, их можно разъединить, например, для очистки, при помощи кнопки на внутренней крышке.

Система контейнеров Vario



Система контейнеров VARIO состоит из корпуса контейнера, внутренней крышки с фильтрами и защитной верхней крышки.



Две крышки могут быть сняты одновременно...



...или отдельно простым нажатием на внешнюю кнопку. Внешнюю крышку можно снять заранее за пределами операционной. При этом контейнер остается закрытым, а его содержимое — стерильным. Крышки систем Vario и Basis имеют различные закрывающие механизмы, поэтому их следует заказывать согласно их индивидуальным каталожным номерам.

Система контейнеров PrimeLine



Многоразовый фильтр защищает от любого внешнего воздействия во время транспортировки и хранения. Крышка сделана из ударпрочного и термостойкого пластика.



Съемная крышка защищает многоразовый фильтр от повреждения во время механической обработки.



В качестве антимикробного барьера используется многоразовый фильтр из PTFE, валидированный на 5000 циклов стерилизации согласно EN 868 (2009), часть 8, Приложение H.

Благодаря материалу крышки PrimeLine обладают следующими характеристиками:

- ударпрочные,
- устойчивые к деформации,
- светостойчивые.

Рекомендации по обработке крышек PrimeLine

- Не используйте для обработки растворители, например, ацетон или бензин
- Последнее ополаскивание должно производиться полностью деминерализованной водой
- Убедитесь, что на крышке нет остатков химических средств
- Не используйте дополнительные химические средства при окончательном ополаскивании
- Не рекомендуется использовать средства, в состав которых входят поверхностно-активные вещества (ПАВ) для обработки